

KaVo ESTETICA® E70

Erleben Sie ein völlig
neues Komfortgefühl.



KaVo. Dental Excellence.

Sinnvoller Komfort hat einen Namen – KaVo ESTETICA® E70.

Einleuchtend clever. Das Ergonomie-Prinzip.

Prinzipiell ganz einfach: Bei der neuen ESTETICA-Generation treiben wir Komfort und Ergonomie für Sie auf die Spitze. Mit intelligenten, individuellen und effizienten Bestandteilen und Funktionen, die Ihnen das Zahnarztleben leicht machen.

Das Fundament der neuen ESTETICA-Generation ist die perfekt durchdachte Schwebestuhl-Technologie. Nur durch sie erreichen wir die ungeahnte Beinfreiheit für Sie und Ihre Assistenz.

Komfort für jeden Tag und für Ihre Zukunft.


Damit auch alles andere so läuft, wie Sie es sich wünschen, stellen wir Ihre KaVo ESTETICA E70 individuell für Sie aus. In jedem Fall erhalten Sie aber unsere neu entwickelte, intuitive Bedienlogik. Warum? Damit bei der Behandlung Fragen überhaupt nicht erst aufkommen und Sie bei Ihrer Arbeit Zeit und Nerven sparen. Apropos Zeit. Dank der automatisierten Hygienefunktionen haben Sie und Ihre Assistenz reichlich davon – schließlich haben Sie Wichtigeres zu tun.

Wenn doch noch ein Wunsch offen ist? Kein Problem. Was Sie jetzt noch nicht integriert haben möchten, können Sie auch später nachrüsten. Denn wir denken schon heute an Ihre Zukunft.

Die Schwingversion der KaVo ESTETICA E70: Dank der komfortablen Auszugslänge der Instrumentenschläuche von 90 cm erreichen Sie immer bequem Ihr Arbeitsfeld.

Die Tischversion der KaVo ESTETICA E70: Ihr Arztelement mit integriertem Display ist in allen Varianten vollkommen intuitiv und effizient bedienbar – konzentrieren Sie sich einfach ganz auf Ihre Arbeit.

Die Cartversion der KaVo ESTETICA E70: Ihr Arztelement ist äußerst mobil, höhenverstellbar und immer dort, wo Sie es benötigen. Oder Sie stellen es einfach zur Seite. Die Cartlösung gibt es auf Wunsch auch mit Wandadaption.

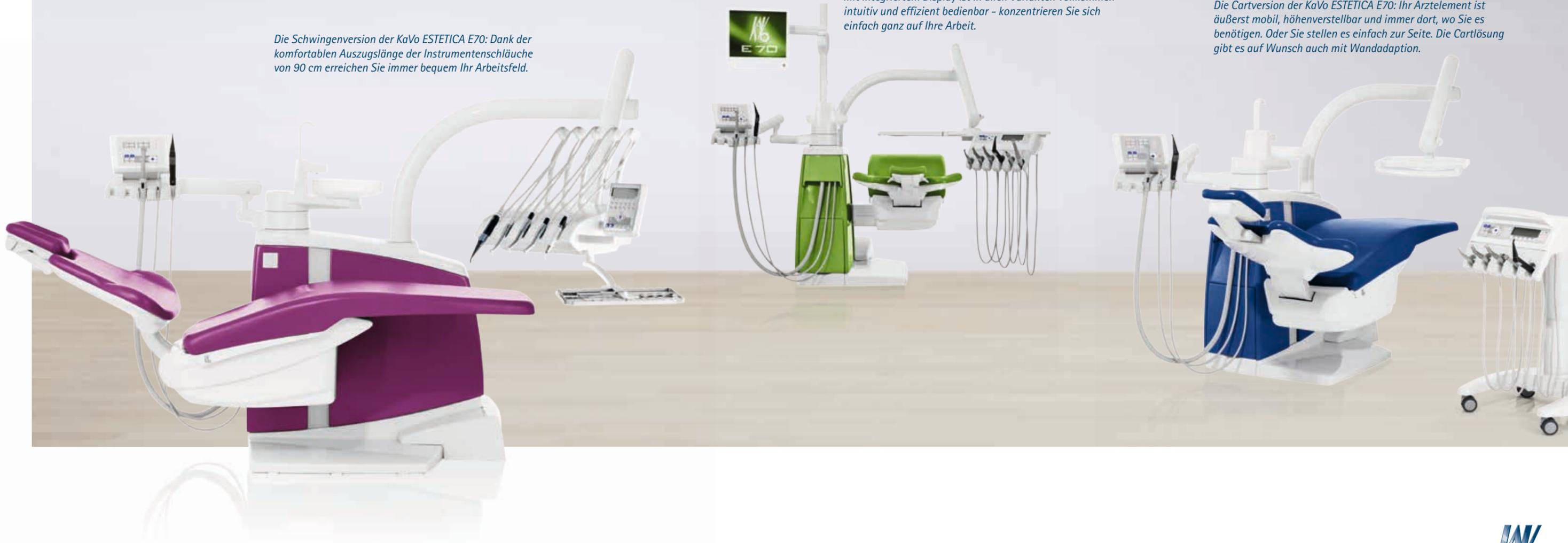

Denken Sie auch, Komfort ist ein Muss?
Dann brauchen Sie ein intelligentes
Behandlungssystem.



Sinnvoller Komfort ist in sich logisch.

Der Grund ist die intuitive Bedienlogik Ihrer KaVo ESTETICA E70. Damit sparen Sie sich lange Einarbeitungszeiten und Fehlgriffe bei der Behandlung. Stattdessen können Sie schnell und sicher auf alle relevanten Funktionen zugreifen. Alles erklärt sich einfach von selbst.

Ihre Beinfreiheit ist eine Frage des Stuhlkonzepts.

Um den Platz unter dem Patientenstuhl Ihrer KaVo ESTETICA E70 vollständig zu räumen, haben unsere Ingenieure sehr viel Kopfarbeit investiert. Mit dem Erfolg, dass Sie es Ihren Beinen ab sofort bequem machen können. Optimale Beinpositionen statt unbequemer Haltung sind für Sie und Ihre Assistenz jetzt Alltag. Und weil Sie und Ihr Team sich dank der optimierten Ergonomie noch wohler fühlen, geht Ihnen die Arbeit besonders leicht von der Hand.

Zur Begabung gehört Vielseitigkeit.

Lesen Sie daher auf den nächsten Seiten, wie Arzt- und Assistenzelement, die Schwebestuhltechnik und der Fußanlasser für sinnvollen Komfort in Ihrem Alltag sorgen.



Alles gut finden. Und alles gutfinden.

Intuitive Bedienlogik erklärt sich von selbst.

Gute Neuigkeiten für Sie: Ihr Bedienelement hält alle Funktionen genau dort zum Abruf bereit, wo Sie diese bereits vermuten. Greifen Sie direkt und bequem auf alle wichtigen Funktionen zu und sparen Sie dabei wertvolle Zeit. Sagen Sie Ihrem Arztelement, was Sie wollen, und es wird es sich merken. So können Sie Motordrehzahl und Drehmoment indikationsbezogen festlegen und flexibel abrufen. Die Handhabung Ihrer KaVo ESTETICA E70 wird für Sie damit noch bequemer – bei jeder Behandlung.

Reichlich Entfaltungsspielraum, reichlich Komfort.

Egal ob Tisch-, Schwingen- oder Cartversion: Bei der Instrumentierung Ihres Arztelements sind Ihnen praktisch keine Grenzen gesetzt. Ihr Instrumententräger hat Platz für fünf bzw. optional sechs Instrumente und die Intraoralkamera – wobei die Tischgröße immer dieselbe bleibt. Ihr besonderer Vorteil hiermit: Sie können auch später problemlos umrüsten. Wie Sie sich auch jetzt entscheiden, dank einheitlicher Tischgröße ist ein späteres Umrüsten leicht. Wenn Sie wollen, erhalten Sie auch USB-Schnittstellen. Damit ist für Ihren zukünftigen Bedarf vorgesorgt und eine nahtlose Integration weiterer Komponenten jederzeit möglich. Ihr Arztelement können Sie leicht und präzise in alle Richtungen bewegen, genau wie Ihren Servicetisch.

Diese Möglichkeit bietet Ihnen ausschließlich KaVo: Entscheiden Sie sich jetzt für 5 oder 6 Instrumentenablagen, und falls sich Ihr Bedarf einmal ändert, rüsten Sie um. Ganz einfach.

Endodontie? Selbstverständlich.

Ein integrierbarer Endoantrieb optimiert zusätzlich Ihre ergonomischen Abläufe. Lassen Sie ihn sich einfach optional in Ihre KaVo ESTETICA E70 einbauen. Ihre Wege sind messbar verkürzt und Ihr Workflow dadurch absolut reibungslos. Und Sie sparen sich damit die Anschaffung zusätzlicher Geräte für endodontische Arbeiten.

Arztelement und Ausstattung – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Einfache und logische Bedienung
- Modular, konfigurier- und erweiterbar
- Neuer Mikromotor INTRA LUX KL 703 LED mit breitem Leistungsspektrum von 100 bis 40.000 min⁻¹
- Intraoralkamera ERGOcam mit optimierter Fokussierung
- Verstellbarer Servicetisch mit Ablage für zwei Normtrays
- Pneumatische Bremsen mit Sensor (optional)
- USB-Schnittstellen (optional)

Ergonomie ist, wenn es KaVo ist. Ganz einfach.

Wir machen Ihnen den Weg frei für mehr Komfort.


Positionieren Sie Ihr Arztelement jederzeit dort, wo es für Sie am angenehmsten ist. So haben Sie immer alles im Griff, unabhängig davon, ob Sie im Sitzen oder im Stehen arbeiten, alleine oder mit Assistenz. Dies gilt sowohl für die Tisch- und Cartversion Ihrer KaVo ESTETICA E70, als auch für die Schwingenversion. Für welche dieser ergonomisch vollkommen durchdachten Versionen Sie sich entscheiden, liegt ganz an Ihren persönlichen Vorlieben.



Auch die Schwingenversion des Arztelements lässt sich dort positionieren, wo es für Sie am angenehmsten ist.

Optimale Greifwege – für höchste Effizienz bei jedem Handgriff.

Das Armdesign Ihrer KaVo ESTETICA E70 ist elegant und hoch funktional zugleich. Es ermöglicht einen maximalen Bewegungsradius und erlaubt Ihnen ideale Greifwege. Die intelligente Trayablage für Normtray, Doppelnormtray und US-Tray kann rechts oder links am Tisch montiert werden. Ihr Tray ist horizontal verschiebbar. In der Schwingenversion können Sie es zusätzlich längs verstellen sowie einfach und schnell auf der gewünschten Seite einhängen. Mit dieser Auswahl und Flexibilität erhalten Sie die optimale Unterstützung bei jeder Behandlung.

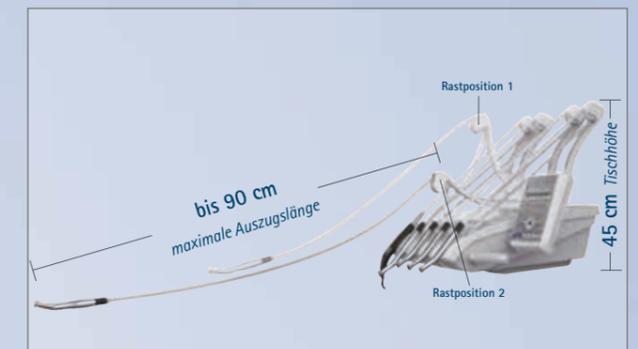

Optimale Ergonomie der Schwingenversion dank geringer Tischhöhe von 45 cm und ausbalanciertem Schwingenbügel. Für großen Freiraum bei der Behandlung sorgt die maximale Auszugslänge der Instrumentenschläuche von 90 cm.

Intuitives Arztelement – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Intuitives, effizientes Arbeiten durch logische und komfortable Bedienung
- Steuerung über Direktwahltasten
- Modular, konfigurier- und erweiterbar
- Entspannte Haltung und alles jederzeit direkt im Griffbereich

Bestnoten für eine gesunde Haltung.

Eine Assistenz für Ihre Assistenz? Bitteschön.

Optimale Arbeitsbedingungen für Ihre Assistenz machen Ihre Praxis noch leistungsfähiger. Daher lässt sich das Assistenzelement Ihrer KaVo ESTETICA E70 auf die Behandlungspositionen Ihrer Mitarbeiter einstellen und unterstützt Sie mit sämtlichen Werkzeugen nach Ihrem Bedarf. Integrieren Sie z. B. eine Polymerisationsleuchte oder eine zusätzliche Chirurgieabsaugung. Alles ist ergonomisch perfekt angeordnet.

Assistenzelement – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Einfache Bedienung durch Direkttasten
- Zusätzliche Instrumente wie Intraoralkamera integrierbar
- USB-Schnittstelle (optional)
- Maximale Flexibilität durch Höhenverstellung und großen Schwenkbereich

Einfachste Bedienung durch Direktfunktion. Immer schnell abrufbar: Stuhl-, Hygiene- und Instrumentenfunktionen.

Ihre gesunde Haltung steht im Mittelpunkt.

Fühlen Sie sich frei, die dazugehörige Bewegungsfreiheit schenkt Ihnen das innovative Schwebestuhlkonzept Ihrer KaVo ESTETICA E70. Unter dem Patientenstuhl befindet sich – nichts. Sie und Ihre Assistenz haben daher allen Platz für unterschiedlichste Beinpositionen. Ihre Abläufe werden noch reibungsloser und erheblich ergonomischer. Reinsten Komfort für Sie, jeden Tag.



Die extreme Tiefstposition von 350 mm ermöglicht eine natürliche Körperhaltung bei Behandlungen am sitzenden Patienten. Durch die Höchstposition von 900 mm können Sie – auch mit einer Körpergröße von 1,80 m – liegende Patienten im Stehen behandeln.

Behandeln Sie stehend und sitzend.

Sie wollen noch mehr Freiheit? Kein Problem. Ihre KaVo ESTETICA E70 stellt sich ganz und gar auf Ihre Körpergröße und Ihre gewünschte Körperhaltung ein. In der Höchstposition können Sie liegende Patienten im Stehen behandeln – selbst wenn Sie über 1,80 m groß sind. Mit der enorm niedrigen Tiefstposition können Sie auch bei sitzenden Patienten eine natürliche Haltung einnehmen. Wechseln Sie einfach nach Bedarf ab.

Schwebestuhl – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Schwebestuhltechnologie für optimale Beinfreiheit
- Stuhlposition von 350 bis 900 mm für bequeme Sitzhaltung sowie stehendes Arbeiten
- Geräuschoptimierte Stuhltriebe mit Softstart
- Trendelenburg-Bewegung

Von Kopf bis Fuß auf Komfort eingestellt.

Sanfte Fußbewegungen statt vieler Handgriffe.

Ihre KaVo ESTETICA E70 hat Hand und Fuß. Ein leichtes Antippen der Schaltflächen Ihres KaVo Fußanlassers genügt daher und Sie können alle Instrumenten- und Stuhlfunktionen sowie die Multimediafunktionen Ihrer KaVo ESTETICA E70 bedienen. Starten Sie ganz einfach per Fuß alle wiederkehrenden Behandlungsabläufe. Ein spezielles Regelventil zur Intensitätskontrolle, z.B. der Turbinendruckluft sowie aller anderen Instrumente, hilft Ihnen Ihre Instrumente sanft und präzise zu steuern.

Wenn Sie kein Kabel am Boden wünschen, wählen Sie für Ihre KaVo ESTETICA E70 statt der Kabelversion den Funk-Fußanlasser. Sie steigern damit Ihren Komfort nochmals.

Hygiene ergibt sich von selbst.

Um Kreuzinfektionen zu verhindern, gibt es kaum ein effizienteres Mittel, als Berührung zu vermeiden. Darum können Sie Patientenstuhl und Instrumente Ihrer KaVo ESTETICA E70 komplett per Fußanlasser steuern. Sie müssen Ihr Arztelement während der Behandlung nicht berühren und können dadurch Kreuzkontaminationen in Ihrer Praxis vermeiden. Beim Funk-Fußanlasser gibt es nicht einmal Kabel, die gereinigt werden müssten.



Die Zeit der Muskelverspannungen ist endgültig vorbei.

Bei herkömmlichen Geräten erfolgt die Fußsteuerung durch unterschiedliche Muskelanspannung, mit der Auf-ab-Bewegung Ihres Fußes. Anders bei KaVo – hier entfällt für Sie diese auf Dauer anstrengende Art der Bedienung. Stattdessen erfolgt die präzise Steuerung Ihrer KaVo ESTETICA E70 durch sanfte, mühelose Rechts-links-Bewegungen Ihres Fußes. So bleibt Ihre Beinmuskulatur auch nach langem Arbeiten entspannt, bei sitzender und bei stehender Behandlung.

Fußanlasser – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Bedienung von Stuhl-, Instrumenten- und Multimediafunktionen
- Keine Ermüdung dank Rechts-links-Bewegung
- Mühelos exakte Drehzahlsteuerung
- Verbesserte Hygiene, insbesondere Vermeidung von Kreuzinfektionen
- Überall frei platzierbar, dank Schwebetechnik auch unter dem Patientenstuhl
- Funk-Fußanlasser (optional) mit verzögerungsfreier Signalübertragung, für noch mehr Hygiene, weil völlig kabellos

Wesentlich bequemer als „Gas und Bremse“: Die exakte Drehzahlsteuerung geschieht mit sanften Rechts-links-Bewegungen Ihres Fußes. Andauernde Muskelanspannung und Verspannungen gibt es daher nicht. Und durch die Funkübertragung sind auch keine Kabel im Weg.

Glauben Sie auch, Sie sind anders?
Dann genießen Sie Ihre neue Freiheit.



Individueller Komfort ist vielschichtig.

Ebenso wie Sie selbst. Halten Sie sich darum am besten alle Möglichkeiten offen. Das geht ganz einfach: Entscheiden Sie sich für Ihre Wunschausstattung und Ihre Lieblingsfarben – genau wie es Ihren Behandlungsschwerpunkten und individuellen Vorstellungen entspricht. Die verschiedenen Komponenten werden nahtlos in Ihre Behandlungseinheit integriert. Wenn Sie es sich später neu überlegen oder Sie andere Behandlungen anbieten wollen? Kein Problem. Nach- und Umrüstung sind jederzeit einfach und bequem möglich.

Zur Persönlichkeit gehört Vielfalt.

Lesen Sie daher auf den nächsten Seiten, wie neue Farben und Funktionen Ihren Alltag günstig beeinflussen und wie individuell und komfortabel sich Ihre KaVo ESTETICA E70 auf Sie und Ihre Patienten einstellt.




Über Geschmack lässt sich nicht streiten – und schon gar nicht über Ihren.

Individuelle Anpassung an das Design-Konzept Ihrer Praxis.


Sind Sie eher der klassische Typ oder wollen Sie Ihre eigenen (Farb-) Akzente setzen? Beides ist möglich. Ihre KaVo ESTETICA E70 ist nämlich genauso individuell wie Sie. Mit dem zeitlos modernen Design und den zahlreichen Lack- und Polstervarianten bleibt praktisch kein Wunsch unerfüllt, und Ihre neue Behandlungseinheit passt genau zu Ihrer Praxiseinrichtung. Ihre persönliche Farbwahl sorgt für ein individuelles Praxisambiente. Jeder, der Ihre Räume betritt, wird sich wohlfühlen.

Modern, fröhlich, warm, peppig, kühl, reduziert, individuell – wählen Sie Ihre persönliche ESTETICA E70 aus über 100 möglichen Kombinationen.

Lackfarben metallic

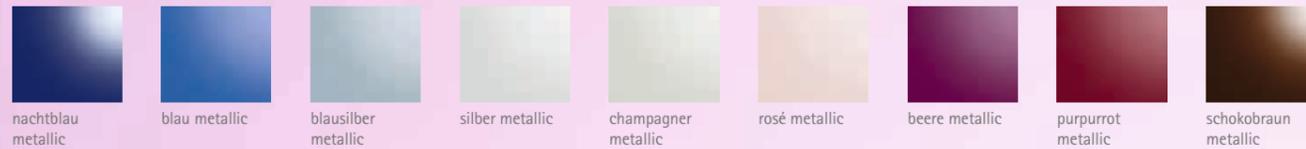

Lackfarben uni

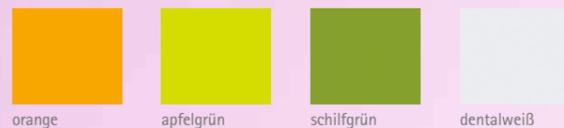

Polsterfarben



Farben und Design – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Große Auswahl an verschiedenen Lack- und Polsterfarben
- Individuelle Farbkombinationen möglich
- Zeitlos modernes Design, hochwertige Materialien

Zwischen Liegen und Schweben liegen Welten.

Schwebestuhltechnologie schafft Komfort und Sicherheit.

Ihre Patienten können auf Ihrer KaVo ESTETICA E70 wunderbar entspannen, beispielsweise durch die automatisierte Patientenlagerung nach Trendelenburg. Damit hebt oder neigt sich die Fußablage des Patientenstuhls abhängig von der Rückenlehnenneigung. Durch die erhöhte Lagerung der Beine wird das Kreislaufsystem Ihrer Patienten unterstützt. Zudem werden Streckungen und Stauchungen beim Wechsel der Position von Oberkiefer- auf Unterkieferbehandlung vermieden – den sogenannten „Auszieheffekt“ gibt es nicht. Und der Kopf des Patienten behält immer die gleiche Position auf der Kopfstütze bei, das Nachjustieren von Rückenlehne und Kopfstütze entfällt für Sie.

Ein weiteres Plus in Sachen Ergonomie: die Längsverstellung der Rückenlehne über die integrierte Stammlängsverstellung (nur mit Rückenlehne Comfort). Die Rückenlehnen-Bewegung ist auf den Drehpunkt der Hüfte ausgerichtet und folgt so der menschlichen Anatomie.

Damit bei der Behandlung außerdem niemand erschrickt, sind die Antriebe Ihrer KaVo ESTETICA E70 geräuschoptimiert. Anspannung verschwindet wie von selbst, eine angstfreie Atmosphäre entsteht. Ihre Patienten werden schon deshalb immer wieder gerne zu Ihnen kommen.

Ihre Patienten dürfen sich wohlfühlen, ganz gleich wie sie sind.

Für optimalen Patientenkomfort können Sie beim Patientenstuhl Ihrer KaVo ESTETICA E70 die Comfort-Rückenlehne wählen. Auf ihr liegen Ihre Patienten auch bei längeren Behandlungen bequem. Die großflächige Auflage stabilisiert den Patientenkörper und ist selbst für Patienten mit Rundrücken geeignet.

Oder entscheiden Sie sich für die Progress-Rückenlehne. Damit sind Ihre Patienten für Sie noch besser zugänglich, speziell bei Kinderbehandlungen ein großer Vorteil für Sie. Die besonders flache Rückenlehenschale gibt Ihnen noch mehr Beinfreiheit.

Bei beiden Rückenlehnen gilt: Sie bieten Ihren Patienten echte Ergonomie – für Jung und Alt und Groß und Klein, unabhängig von den körperlichen Gegebenheiten.



Rückenlehne Progress: richtige Arbeitshaltung und optimaler Zugang für den Zahnarzt, speziell bei Kinderbehandlungen. Bequeme Position für Personen bis 1,90 m.



Rückenlehne Comfort: maximaler Komfort und breite Schulterauflage für Ihre Patienten. Gute Schulterunterstützung für Personen bis 1,95 m.

Patientenlagerung – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Zwei Rückenlehnen mit Softpolster zur Auswahl
- Kopfstützen: motorisch oder manuell einstellbar
- Armlehne links oder rechts nach Wahl
- Stammlängsverstellung und Kreisbogensegment
- Kindersitz



Besonders komfortabel: Die Längsverstellung der Rückenlehne Comfort sorgt durch die integrierte Stammlängsverstellung für optimale Ergonomie und maximalen Komfort für Ihre Patienten.*

** nur mit Rückenlehne Comfort*

So schön kann gesundes Sitzen sein.

Hier dreht sich alles um Ihren Rücken.

Für Sie als Zahnarzt ist es besonders wichtig, eine dauerhaft ergonomisch gesunde und komfortable Körperhaltung in jeder Behandlungssituation einzunehmen. Und nichts beeinflusst Ihre Körperhaltung so sehr, wie der Arbeitsstuhl auf dem Sie täglich sitzen.

Produkte mit einem Höchstmaß an Ergonomie und Komfort bietet KaVo seit jeher an. So ist auch der neue KaVo PHYSIO Evo exakt auf die Bedürfnisse und Arbeitsabläufe von Zahnärzten und Assistenten ausgerichtet.



Ergonomie und Komfort in Perfektion: Mit dem KaVo PHYSIO Evo sitzen Sie immer in gesunder, natürlicher Haltung.

Eine Frage der richtigen Einstellung.

Das intelligente Stuhlkonzept des KaVo PHYSIO Evo erfüllt höchste Ansprüche an eine ergonomische Sitzposition. Dank getrennter Einstellfunktionen lassen sich Sitzfläche und Rückenlehne individuell auf Ihre anatomischen Anforderungen und Ihren persönlichen Behandlungsstil anpassen. Reibungslose Arbeitsabläufe und größtmöglicher Sitzkomfort werden damit bei jeder Behandlung selbstverständlich.

Ergonomie steckt im Detail.

Rücken- und Sitzpolster des KaVo PHYSIO Evo sind ergonomisch geformt. Die zentrierte Erhöhung im Sitzpolster bietet einen stabilen Sitz und verhindert Verrutschen selbst bei schnellen, kurzen Rollbewegungen. Die abgerundete Oberschenkelauflage bietet viel Bewegungsfreiheit.

Dank der federkraftunterstützten Rückenlehne wird die Rückenmuskulatur insbesondere im Lendenwirbelbereich permanent aktiv gestützt und so dauerhaft geschont.

Ein ausgezeichnetes Konzept.

Der Behandlungsstuhl KaVo PHYSIO Evo ist mit dem Gütesiegel des Vereins „Aktion gesunder Rücken“ (AGR) ausgezeichnet. Eine unabhängige, multidisziplinäre Expertenkommission legt dieser Auszeichnung strenge Prüfkriterien für Ergonomie und Gesundheit zugrunde.



Innovatives Design in überzeugender KaVo Qualität.

Gesundes Sitzen mit Form und Farbe.

Der KaVo PHYSIO Evo hat eine schlanke, moderne Bauweise und bietet eine große Farbvielfalt. Die kompakte Bauweise und der geringe Durchmesser des Fußkreuzes bieten viel Bewegungsfreiheit selbst auf engstem Raum. Das Farbspektrum des KaVo PHYSIO Evo ist auf die Farben der Behandlungseinheiten KaVo ESTETICA E80, E70 und E50 abgestimmt.

Darauf können Sie setzen – Qualität made by KaVo.

Hochwertige Materialien in bester KaVo Verarbeitungsqualität und umfassende Dauertests garantieren eine lange Haltbarkeit. Auch bietet der KaVo PHYSIO Evo eine schnelle und zuverlässige Hygiene: Alle verarbeiteten Komponenten sind mit geringsten Spaltmaßen zusammengefügt und die Oberflächen lassen sich einfach reinigen.

Dental Excellence rechnet sich.

Eine ergonomisch gesunde Sitzhaltung kann maßgeblichen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit Ihrer Praxis haben. Denn dauerhaft beschwerdefrei in gesunder Haltung zu arbeiten ist für Sie und Ihre Mitarbeiter auf lange Sicht unbezahlbar.



Ein extrem schlankes Fußkreuz für viel Bewegungsfreiheit und weiche, gebremste Rollen für kontrollierte Rollbewegungen.

Alle Vorteile auf einen Blick.

- Perfekte Ergonomie bei höchstem Sitzkomfort für dauerhaft gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- KaVo Qualität in perfekter Verarbeitung für reibungslose Zuverlässigkeit im täglichen Praxisablauf
- Attraktive Farben und modernes Design zur individuellen Praxisgestaltung
- Beste Hygiene dank präziser abgestimmter Komponenten mit geringen Spaltmaßen und reinigungsfreundlichen Oberflächen



Einfach alles im Blick. Ihr Einstieg in die digitale Dentalwelt.

Gewinnen Sie mit ERGOcom light an Geschwindigkeit und Komfort.

Verbinden Sie ganz einfach Ihre Systeme: Praxisrechner, Behandlungseinheit und weitere Medienquellen. Auf diese Weise erhalten Sie unter anderem den letzten Befund Ihres aktuellen Patienten direkt auf das 17" Display Ihrer KaVo ESTETICA E70 – und die dazugehörigen Röntgen-, Mikroskop- und Kameraaufnahmen oder Bilder vom PC. Sofort und ohne, dass Sie oder Ihre Assistenz den Raum verlassen müssen. ERGOcom light ist Ihre einfache, optionale Lösung dafür.

Ihr Multimediasystem ist schon einsatzbereit.

Damit Sie Ihr ERGOcom light verwenden können, benötigen Sie weder PC-Anbindung, noch müssen Sie Kabel verlegen lassen. Die Funktionen können Sie sowohl per Fußanlasser, als auch über das Arztelement Ihrer KaVo ESTETICA E70 steuern.


Mehr Licht und Schärfe für perfekte intraorale Bilder.

Mehr sehen, mehr erkennen – dabei hilft Ihnen die neue Intraoralkamera ERGOcam. Erklären Sie Ihren Patienten die Behandlung anhand beeindruckender Bilder oder dokumentieren Sie Ihre Behandlungserfolge. Die Bedienung mit Schieberegler und definierten Fokuspositionen ist denkbar einfach. Beeindruckend ist die hohe Tiefenschärfe und die hervorragende Farbwiedergabe dank modernster CMOS-Chip Technologie insbesondere für detailreiche Bilder auch im Bereich der Gingiva.

Die Intraoralkamera ERGOcam liegt ergonomisch perfekt in der Hand und ihre 40.000 LUX sorgen für eindrucksvolle Bilderergebnisse.

ERGOcom light Multimedia – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Kamerabilder auch ohne PC darstellbar
- Darstellung von vier Kamerabildern gleichzeitig
- PC-, Mikroskop- und Röntgenbilder auf dem Display der Dentaleinheit
- Hygienische Bedienung per Fußanlasser

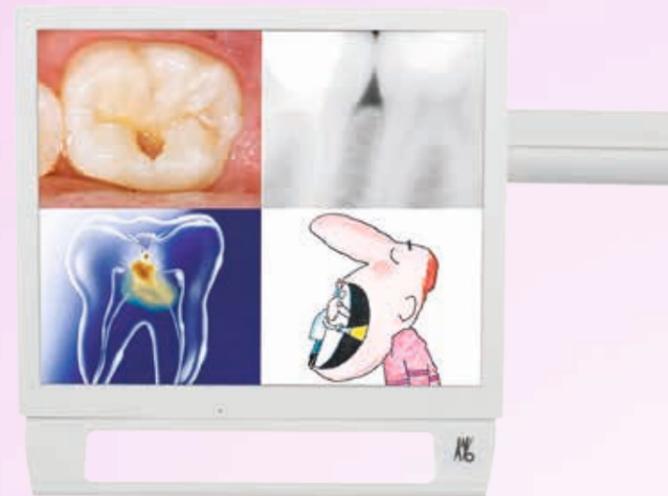


Praxismarketing wie von selbst. Überbrücken Sie Wartezeiten und informieren Sie Ihre Patienten über Ihr Praxisangebot.

So arbeiten Sie morgen. Werfen Sie einen Blick in die Zukunft.

SMARTdrive befördert Sie kraft- und gefühlvoll in die Zukunft.

Präzises, effizientes und zeitsparendes Arbeiten bietet die neue Motorsteuerung SMARTdrive mit voller Durchzugskraft und besonders vibrationsfreiem Anlaufverhalten bereits im niedrigen Drehzahlbereich von 100 min⁻¹. Durch den erweiterten Drehzahlbereich sind nun auch Kariesentfernung oder Polieren mit nur einem Winkelstück möglich. Somit entfällt das häufige Umrüsten des Winkelstücks und Sie sparen wertvolle Zeit während der Behandlung. Des Weiteren sparen Sie Investitionen in stark reduzierende Winkelstücke, da Sie mit dem SMARTdrive einen großen Drehzahlbereich abdecken können.

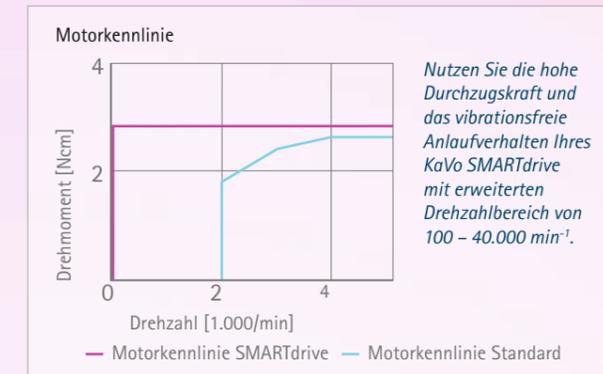

Einfach hygienisch: Abnehmbare Griffe und glatte Oberflächen erlauben eine schnelle und gründliche Desinfektion. Die berührungslose Bedienung sorgt für ein minimales Risiko von Kreuzkontaminationen und maximale Sicherheit für Ihre Patienten.

Natürlich und komfortabel – das 5 Sterne-Licht für Ihre Praxis.

Eine Behandlungsleuchte, die Ihre Sichtweise verändern wird: KaVoLUX 540 LED sorgt mit bis zu 40.000 LUX aus dem einzigartig optischen System und vier verschiedenfarbigen LEDs für natürlich weißes Licht in höchster Qualität. Das gleichmäßige, schattenfreie Lichtfeld bietet höchsten Behandlungskomfort. Der überragende Farbwiedergabewert ermöglicht Ihnen zudem einen exakten Abgleich von Zahn- und Kompositfarbe mit Hilfe der Behandlungsleuchte direkt an Ihrer KaVo ESTETICA E70. Die Farbtemperatur der KaVoLUX 540 LED lässt sich in fünf Stufen individuell auf Ihre Bedürfnisse einstellen und der innovative COMPOsave Modus filtert sämtliche Blauanteile des Lichts heraus und verlangsamt so das Aushärten des Füllmaterials. Ohne das Licht dimmen zu müssen, können so lichthärtende Materialien entspannt bearbeitet werden. Mit dem arretierbaren 3D-Gelenk ist die KaVoLUX 540 LED höchst variabel einstellbar und durch ihre berührungslose Bedienung sowohl komfortabel als auch hygienisch.

Ein Lichtblick auch in Sachen Sicherheit und Hygiene: Geschlossenes Gehäuse mit glatten Oberflächen für eine schnelle Wischdesinfektion und abnehmbare, thermodesinfizierbare Griffe.



red dot design award: Das Design Ihrer KaVoLUX 540 LED ist perfekt durchdacht. Sie ermöglicht ideale Arbeitsbedingungen durch modernste LED Technologie, die ein perfektes Licht für höchste Ansprüche liefert. „red dot“ steht für innovative Produktlösungen und hohe Qualität.



Evolution ist eine Frage der Anpassung – und der Ausstattung.

Arzt- und Assistenzelement zeigen höchste Flexibilität.

Sie wissen genau was Sie wollen? In Sachen Instrumentierung sind Ihnen sowohl beim Arzt-, als auch beim Assistenzelement praktisch keine Grenzen gesetzt. Statten Sie beide ganz nach Ihrem Bedarf aus. Arzt- und Assistenzelement Ihrer KaVo ESTETICA E70 stellen sich so auf Ihre Spezialisierungen und die Ihres Teams ein und sind offen für zukünftige Instrumente und Erweiterungen.



PiezoLED: die innovative Ultraschall-Technologie für höchsten Standard in der Patientenbehandlung.

Behandeln Sie Ihre Patienten effektiv und zeitsparend mit PiezoLED.

Mit dem neuen PiezoLED Ultraschall-Scaler stellen Sie für Ihre Patienten eine hochpräzise und effektive Zahnreinigung sicher. Die integrierten Titansonotroden des PiezoLED sorgen für kontrolliert lineare Schwingungen, die eine zeitsparende und effektive Behandlung Ihrer Patienten ermöglichen. Zahn und Zahnfleisch bleiben durch das exakte Arbeiten auch in besonders filigranen Bereichen unberührt.

Zirkuläre Lichtemissionen bieten Ihnen optimale Sicht, und im Zusammenspiel mit dem leichten und ergonomischen Design behandeln Sie Ihre Patienten stets unter optimalen Bedingungen.

Damit sind Sie immer zukunftsfähig.

Unabhängig davon, wo Ihr Behandlungsschwerpunkt liegt, oder ob Sie das gesamte Spektrum nutzen wollen – Ihre ESTETICA E70 passt sich ganz an Sie und Ihre Wünsche an: Endodontie, HF-Chirurgie und Kochsalzlösungspumpe, MULTIflex und INTRAmatic-Kupplung, Röntgenbildhalter, Multifunktionsspritze und vieles mehr. Als universelle Schnittstellen sind die Kupplungssysteme Ihres Arztelements wahre Multitalente.

Individuelle Bestückung – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Flexible Ausstattungsmöglichkeiten für Arzt- und Assistenzelement
- Unterstützung unterschiedlichster Behandlungsschwerpunkte, je nach Bedarf
- Breite Auswahl an Zusatzausstattungen, auch später nachrüstbar
- Zukunftssichere, standardisierte Schnittstellen für problemlose Anwendung und Erweiterung

Eine starke Leistung – wir machen Ihnen die Arbeit leichter.

KaVo INTRA LUX KL 703 LED – ein Leichtgewicht fürs Gleichgewicht.

Mit dem neuen wartungsfreien, kollektorlosen Mikromotor KaVo INTRA LUX KL 703 LED erleben Sie Höchstleistung in Reinform. Er ist SMARTdrive optimiert und bietet ein breites Drehzahlpektrum von 100 bis 40.000 min⁻¹ bei einfacher Übersetzung. Durch sein um 30% reduziertes Gewicht und seine um 25% kleinere Bauform liegt er perfekt in der Hand und sorgt für optimale Balance bei perfekter Gewichtsverteilung. Er bietet mehr als ausreichend Leistung in jeder Behandlungssituation und sorgt für spürbar präziseres Handling bei gleichzeitig ermüdungsfreierem Arbeiten. Für die einfache Hygiene ist der INTRA LUX KL 703 LED sterilisierbar und für die perfekte Sicht hat er eine langlebige 25.000 LUX LED gleich inklusive. Herausragende Leistungswerte für herausragende Behandlungsergebnisse in Serie.



KaVo INTRA LUX KL 703 LED: klein, leicht und mit mustergültiger Gewichtsverteilung.

Bleiben Sie offen für die Zukunft – dank Schnittstellenstandard USB.



Schließen Sie über die USB-Schnittstelle Ihrer KaVo ESTETICA E70 ganz einfach weitere ausgewählte Geräte an. Das geht besonders einfach, weil bei USB in der Regel keine zusätzlichen Einstellungen notwendig sind. Ihr Behandlungssystem erkennt von selbst, was Sie angeschlossen haben.

Stärker, schneller, leichter –COMFORTdrive.

Mit COMFORTdrive hat KaVo ein neues Instrumentenzeitalter eingeleitet. COMFORTdrive verbindet die Vorteile von Turbine und Schnellläufer in einer eigenständigen Lösung. Mit seinem Drehzahlbereich von 30.000 bis zu 200.000 min⁻¹ ist er für alle Präparationen geeignet und liegt dazu perfekt in der Hand. Der Schwerpunkt ist optimal ausbalanciert, so dass Ihre Hand und Ihre Finger wesentlich weniger belastet werden. Freuen Sie sich täglich über ein leichteres, effizienteres und entspannteres Arbeiten mit COMFORTdrive und COMFORTbase.

Individuelle Bestückung – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Integriertes SMARTdrive für präzises Arbeiten im niedrigen Drehzahlbereich
- Verbessertes Mikromotor INTRA LUX KL 703 LED mit breitem Drehzahlbereich von 100 bis 40.000 min⁻¹
- PiezoLED zur effektiven und zeitsparenden Patientenbehandlung
- Neueste Instrumententechnik mit COMFORTdrive für noch entspannteres und effizienteres Präparieren
- Zukunftssichere, standardisierte Schnittstelle für problemlose Anbindung externer Geräte
- Breite Auswahl an intelligenten Zusatzausstattungen, auch später nachrüstbar

KaVo COMFORTdrive ist Ihr leistungsstarkes Leichtgewicht mit äußerst angenehmem Laufgeräusch.



Meinen Sie auch, mehr Zeit zu haben wäre schön? Dann brauchen Sie ein effizientes Behandlungssystem.

Komfort ohne Effizienz ist kein Komfort.

Ihre KaVo ESTETICA E70 sorgt von selbst für zeitsparende, effiziente Abläufe. Denn wir meinen, Sie sollen auch mit Ihrer Zeit komfortabel umgehen können. Arbeiten, die sich sinnvoll automatisieren lassen, übernimmt Ihre Behandlungseinheit für Sie und Ihre Assistenten. Zum Beispiel bei der Hygiene. Das ist eine echte, messbare Erleichterung für Ihre Praxis.

Wer flink sein will, kann langsam machen.

Alle Bestandteile Ihrer KaVo ESTETICA E70 sind vollständig integriert und ideal ausbalanciert – Sie erleben Leichtigkeit bei allen Ihren Handgriffen und Bewegungen. Die Arbeitsabläufe sind vollendet ergonomisch gestaltet, der Workflow spürbar zeitsparend – ohne dass Sie sich beeilen müssen. Effizienz ergibt sich ganz bequem von selbst.

Zum Schnellsein gehört Verlässlichkeit.

Lesen Sie daher auf den nächsten Seiten, wie Sie trotz erheblicher Zeitersparnis bei Ihren regelmäßigen Hygienearbeiten an zusätzlicher Sicherheit für Sie, Ihr Team und Ihre Patienten gewinnen. Erfahren Sie außerdem, wie Sie vom reibungslosen, effizienten Workflow profitieren und auch in Zukunft offen für Neues sind. Mit überlegener Qualität und allem Komfort.



Saubere Leistung, mit allen Wassern gewaschen.



Zeit sparen per automatisierter Hygiene.

Mit der automatisierten Dauerentkeimung Ihrer KaVo ESTETICA E70 ersparen Sie Ihrer Praxis zeitaufwändige Hygienearbeiten. Denn OXYGENAL 6 verhindert in Ihrem Behandlungssystem, dass sich Mikroorganismen im normalen Betrieb ausbreiten. Zusätzlich stellt die Intensiventkeimung eine einwandfreie Qualität der Kühl- und Sprühflüssigkeiten auch bei längerer Standzeit sicher. Es gibt im gesamten Leitungssystem kein totes Leitungsende, denn eine Ringleitung im Arztelement sorgt dafür, dass das System permanent durchspült wird, ohne keimanfällige Sackgassen in denen sich die Keime festsetzen und verbreiten können.

Keine Chance für Keime dank permanenter Durchspülung des Ringleitungssystems.

Sicherheit durch automatisierte Desinfektion.

Sicherheit geht immer vor. Die Hygienefunktionen Ihrer KaVo ESTETICA E70 verhindern Pflegefehler, schützen Sie, Ihr Personal und Ihre Patienten und erhöhen die Funktionssicherheit Ihres Systems. Durch die automatisierte Hydrocleanfunktion werden das ganze Absaug- und Abflusssystem sowie die Absaugschläuche mit Wasser gereinigt und mit der vollautomatischen Dosierung von Dekaseptol Gel desinfiziert. Auf diese Weise entfallen manuelle Tätigkeiten, und Ihr Personal hat keinen Kontakt mit den Desinfektionsmitteln.



OXYmat und DEKAmat – im Gerätekörper integriert – bringen jetzt standardisierte und automatisierte Hygiene in Ihre Praxis. Das bedeutet für Ihre Assistenz weniger manuellen Aufwand. Des Weiteren garantiert die automatisierte Pflege ein Plus an Funktionssicherheit.

Automatisches Spülprogramm gemäß RKI.

Und wieder ein bisschen Zeit gespart. Das tägliche Spülen aller Wasser führenden Leitungen wird durch das automatisierte Spülprogramm erleichtert. Aktivieren Sie die variabel einstellbare Spülzeit einfach per Knopfdruck.



Besserer Schutz durch Rücksaugstopp.

Kleine Idee, große Wirkung. Ein Rücksaugstopp an KaVo Instrumenten und Motoren schützt das Wasserversorgungssystem. Das wiederum schützt Ihren Patienten und verhindert, dass kontaminiertes Spraywasser in die Behandlungseinheit gesaugt wird.



Höherer Komfort durch motorisch schwenkbares Mundspülbecken.

Durch Wahl der Spülposition schwenkt das Mundspülbecken automatisch (optional) zum Patienten und erleichtert somit das Ausspülen. Das Becken schwenkt automatisch in die Ausgangsposition zurück, sobald sich der Patient wieder in die Behandlungsposition begibt.




Wichtige Bestandteile, wie z.B. Porzellanmundspülbecken, Mundglasfüller und Abdeckungen, sind thermodesinfizierbar.

Ihre KaVo ESTETICA E70 vereinfacht Ihre Hygienearbeiten dank abnehmbarer und desinfizierbarer Griffe, Silikonmatten, Mundspülbecken, Instrumentenablagen und Schwingenbügel. Die Saugfilter sind dank Hygienegriff bequem und sicher wechselbar.

Zeitsparende Hygiene – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Automatisierte und standardisierte Hygiene
- Zeitsparende und einfache Reinigung
- Abnehmbare Geräteteile
- Mehr Sicherheit dank Rücksaugstopp

Serienmäßige Nebenluftkanäle verhindern ein Festsaugen der Kanülen im Patientenmund. Kontaminierte Flüssigkeiten können durch den ununterbrochenen Saugstrom nicht mehr zurückfließen, Kreuzinfektionen durch Reflux sind praktisch ausgeschlossen. Und zwar mit allen auf dem Markt befindlichen Standardkanülen.

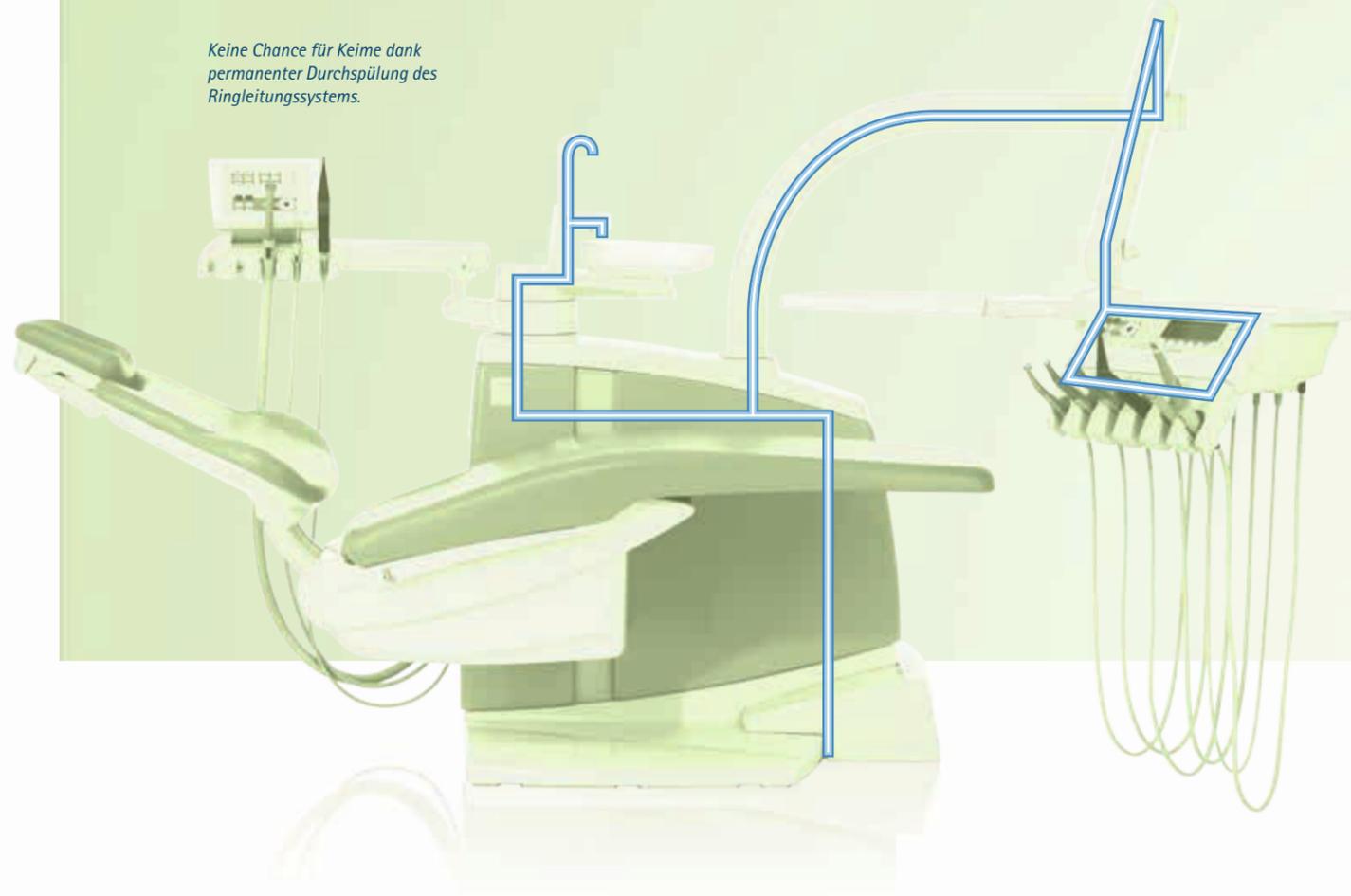

Die Quelle Ihres perfekten Workflows.

Ihr Arztelement beschleunigt Ihre Arbeitsabläufe.

Weil es bei der Behandlung oft auf Geschwindigkeit ankommt, sorgt Ihr Arztelement für schnelle Informationen und die schnelle Steuerung aller wichtigen Funktionen.

Wie können Sie bei diesem Tempo alles im Griff und im Blick behalten? Ihr Arztelement hilft Ihnen dabei umfassend. So lässt es sich z.B. zügig und bequem positionieren. Seine Sensorbremse (optional) löst sich unmittelbar bei Berührung des Griffs und arretiert beim Loslassen. Ihr Servicetisch ist zusätzlich schwenkbar. Genau so, wie es gerade erforderlich ist.


Kurze Wege machen Ihnen die Arbeit einfach.

Wohin passt Ihre OP-Leuchte und wohin mit dem Röntgengerät? Wo ist der ideale Platz für Zusatzgeräte? Wie installiert man am besten das Mikroskop und wohin gehört der Monitor? Viele Fragen, auf die es eine Antwort gibt: Ihr KaVo Centro-Trägersystem löst Ihre individuellen Anforderungen an Raum und Ordnung. Von der Beleuchtung bis hin zu Ablage-tablets – Centro trägt Ihre zusätzlichen Geräte ganz nach Ihren Wünschen. Sie optimieren damit Ihre Ergonomie noch weiter und gewinnen viel Freiraum für vollständig konzentriertes Arbeiten.




Der optimierte Workflow verkürzt Ihre Wege bei der Behandlung messbar. Nutzen Sie, z. B. durch integrierte Endoantriebe, die entstehende Zeitersparnis individuell nach Ihrem Bedarf – weniger Wege durch integrierte Technik und optimierte Ergonomie.

Wege mit konventioneller Behandlungseinheit.

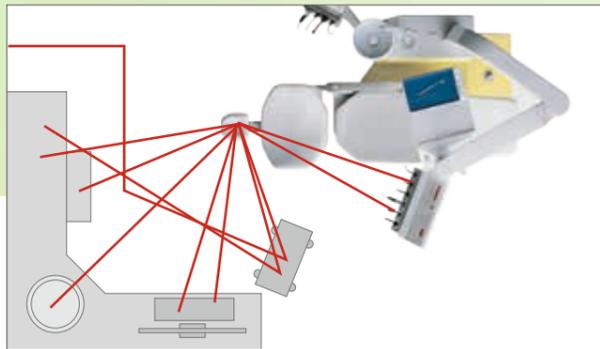

Wege mit der neuen KaVo ESTETICA E70.

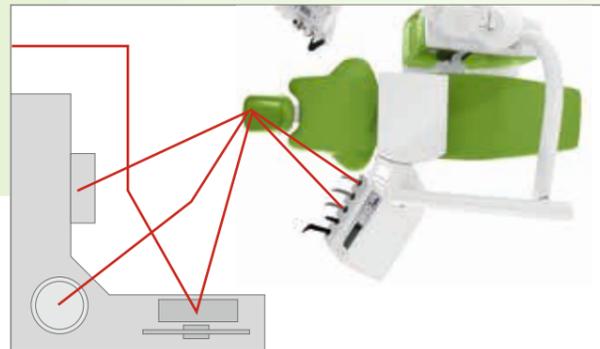

Mehr Effizienz auch für Ihr gesamtes Team.

In Ihrer Praxis ist gute Zusammenarbeit gefragt. Deshalb ist auch das Assistenzelement flexibel platzierbar, schwenkbar, höhenverstellbar, und seine Bedienfolie verfügt über dieselbe Farbcodierung wie Ihr Arztelement. Da eine klare Kommunikation bereits die halbe Miete ist, sind Assistenzelement, Arztelement und Patientenstuhl Ihrer KaVo ESTETICA E70 perfekt aufeinander abgestimmt. Es gibt weder Umwege noch Unterbrechungen.

Perfekter Workflow – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- **Komplette Integration aller Bestandteile, z. B. für Endodontie, Röntgen, etc.**
- **Abstimmung der Systeme aufeinander**
- **Umfassende Einstellmöglichkeiten aller Komponenten**
- **Informationssysteme für reibungslose Abläufe**
- **Sensorbremse im Arztelement (optional)**
- **Ausbalancierte Bewegungen**

Die Überlegenheit steckt in der Qualität.

Hergestellt in Deutschland. Denn wir gehen auf Nummer Sicher.

In Langzeittests von überdurchschnittlicher Dauer wurde die KaVo ESTETICA E70 geprüft. Selbst bei der Simulation mit extrem hoher Gewichtsbelastung traten keinerlei Probleme auf. Natürlich wurde auch die Ergonomie kritischen Prüfungen unterzogen. Durch die Mithilfe erfahrener Praktiker während der Entwicklungszeit hatten wir die Gelegenheit, unter anderem die individuellen Anpassungsmöglichkeiten der Einheit für die unterschiedlichsten Anforderungen des Zahnarztalltags zu verfeinern und immer weiter zu optimieren. Mit bestem Ergebnis, geprüft und zertifiziert nach anspruchsvollsten deutschen und internationalen Standards.

Überragende Qualität – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- **Solide Bauweise mit hochwertigsten Materialien**
- **Präzise Verarbeitung nach höchsten Qualitätsstandards**
- **Feinste Abstimmung und Abstufung aller Funktionen**
- **Größte Funktionssicherheit durch umfassende Dauertests**

Wir bieten Ihnen größten Komfort und noch mehr.

Bei Ihrer KaVo ESTETICA E70 erleben Sie höchsten Komfort in Verbindung mit konsequenter Funktionalität. Nicht nur in jedem Detail, sondern auch im gesamten Zusammenspiel der Bestandteile. Wir verstehen, dass es wie bei Ihrer Arbeit auf feinste Abstimmung und Abstufungen ankommt. Nur diese hochwertige Fertigung erlaubt die Realisierung einer Behandlungseinheit für optimales und komfortables Arbeiten. Mit Ihrer KaVo ESTETICA E70 erhalten Sie diesen höchsten Qualitätsstandard.



Hochwertige Oberflächen und Materialien, verarbeitet in bewährter KaVo-Qualität.



Erst Ihr Wunsch, dann Ihr Vergnügen.

	T	C	S		T	C	S
Patientenstuhl				Assistenzelement			
Softpolster	●	●	●	Spraynebelabsaugung	●	●	●
Rückenlehne				Speichelzieher	○	○	○
Comfort	x	x	x	Zweiter Speichelzieher	○	○	○
Progress	x	x	x	Dreifunktionshandstück	○	○	○
Kopfstütze				oder Mehrfunktionshandstück	○	○	○
2-Gelenk mechanisch	x	x	x	Polymerisationsleuchte Satelec MiniLED	○	○	○
2-Gelenk pneumatisch	x	x	x	Hydrocolloid-Anschluss	○	○	○
SOMATIC E-motorisch	x	x	x	USB-Schnittstelle	○	○	○
Armlehne				Trayhalter für Tablettaufnahme	○	○	○
Rechts	○	○	○	Höhenverstellbarer Arm	●	●	●
Links	○	○	○	DIAGNOdent-Halter	○	○	○
Arztelement				Gerätekörper			
1. Turbinenschlauch	●	●	●	Mundspülbecken in Glas	x	x	x
2.-5. Turbinenschlauch	○	○	○	Mundspülbecken in Porzellan	x	x	x
1. KL-Motor 703 LED	●	●	●	Mundspülbecken motorisch	○	○	○
2.-5. KL-Motor 703 LED	○	○	○	Dauerentkeimung	●	●	●
SMARTdrive	●	●	●	Intensiventkeimung	●	●	●
Endofunktion	○	○	○	HYDROclean	●	●	●
COMFORTbase	○	○	○	AQUAmat	●	●	●
Dreifunktionshandstück	●	●	●	DEKAmat und OXYmat	●	●	●
Mehrfunktionspritze	○	○	○	Warmwasserboiler	●	●	●
PiezoLED Ultraschall-Scaler	○	○	○	VACUstopp	●	●	●
Sprayerwärmung für Instrumente	●	●	●	Funk-Fußanlasser	○	○	○
Rücksaugstopp für Instrumente	●	●	●	Versorgungssystem			
Multifunktionsdisplay Memodont	●	●	●	Wasserblock DVGW	●	●	●
HF-Elektrochirurgie	○	○	-	Zusatzgeräteanschluss	○	○	○
ERGOcam	○	○	○	AQUAmat	●	●	●
Kl. Röntgenbildbetrachter	○	○	○	Entsorgungssystem			
Gr. Röntgenbildbetrachter	○	○	○	Externe Absaugung	●	●	●
Service Tisch 1568	-	○	-	DÜRR Amalgamabscheider	○	○	○
Physiologische Kochsalzlösung	○	○	○	DÜRR Separierautomatik	○	○	○
Chirurgiemotor SL 550	-	-	○	Sonstiges			
Verstellbarer Servicetisch	●	●	-	KaVo PHYSIO Evo	○	○	○
für zwei Normtrays				KaVoLUX 540 LED	○	○	○
USB-Schnittstelle	○	○	○	Leuchtenaufbaustange	○	○	○
Pneumatische Bremse für Armsystem	○	-	○	ERGOcom light	○	○	○
Tablettaufnahme für zwei Normtrays	●	-	x	DEKASEPTOL Gel-Basisset	●	●	●
Tablettaufnahme für ein Normtray	-	-	x				

● Serienausstattung ○ Optionale Ausstattung x Muss gewählt werden - Nicht lieferbar



Polymerisationsleuchte Satelec MiniLED



KaVo INTRA LUX KL 703 LED



Kleiner Röntgenbildbetrachter, 5 x 5 cm



Panorama-Röntgenbildbetrachter: am Zahnarztelement oder am Servicetisch positioniert



KaVo Elektrochirurgiegerät



DIAGNOdenthalter für Assistenzelement



KaVoLUX 540 LED




PiezoLED Ultraschall-Scaler



Intraalkamera ERGOcam



Trägersystem Centro

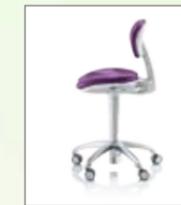

Arbeitsstuhl KaVo PHYSIO Evo



Fremdgeräteanschluss: einfache Versorgung von Zusatzgeräten mit Wasser, Luft und Strom



2-Gelenk-Kopfstütze mechanisch verriegelt



2-Gelenk-Kopfstütze pneumatisch verriegelt



Motorisch einstellbare Kopfstütze



KaVo Funk-Fußanlasser

Weitere Informationen unter www.kavo.com/e70



KaVo. Dental Excellence.